

Ablauf der Einzeltestung (beim Lollitest):

Jedes Kind bekommt ein Teströhrchen für den Einzeltest mit nach Hause. **Bitte bewahren Sie dieses Teströhrchen sicher auf! Solange der Gruppentest (Pooltest) negativ ist, bleibt das Einzelteströhrchen verschlossen!**

Sollte ein Gruppentest positiv sein, werden Sie von der Klassenleitung/ Schulleitung/ OGS-Leitung informiert. **Erst dann** nehmen Sie das Röhrchen und lassen Sie Ihr Kind den Test wie folgt machen:

1. Ihr Kind lutscht 30 Sekunden an dem Wattetupfer. Danach stecken Sie den Tupfer in das Röhrchen und verschließen es.

2. Sie klicken folgenden Link an*:

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW361

Hier schreiben Sie den Namen und das Geburtsdatum Ihres Kindes sowie Ihre Handynummer in die richtigen Felder. Dann klicken Sie auf „Registrieren“.

3. Oben rechts erscheint dann die Registrierungsnummer. Diese Nummer schreiben Sie auf das Röhrchen.

4. Bringen Sie den Test bis 08.30 Uhr am nächsten bzw. gleichen Morgen zur Schule.

- Alle Kinder dieser Gruppe haben an dem Tag keinen Präsenzunterricht bzw. keine Notbetreuung und müssen vorläufig zu Hause bleiben!
- Bitte bewahren Sie das Teströhrchen mit dieser Anleitung sicher auf, damit Sie im Falle einer Benachrichtigung den Test schnell durchführen können.
- ***Tipp: Registrieren Sie Ihr Kind bereits jetzt und beschriften Sie das Röhrchen vorab!** Dann sind Sie für den Fall der Fälle gut vorbereitet und müssen nur noch den Test durchführen und zur Schule bringen!
- Melden Sie sich bei uns, wenn es mit dem „Vorab-Registrieren“ nicht klappt, dann helfen wir Ihnen gerne dabei!